



ALLFLEX TTU VÆVSPRØVETANG

DANSK BRUGSANVISNING





Sæt han-delen, med prøvetagnings-kanylen fast i øverste kæbe på tangen. Hold låsen inde for at sætte mærket med kanylen på plads, og slip for at låse.



Sæt hun-delen på plads i underste kæbe på tangen.

Tryk låsen ned for at sætte mærket på plads, og slip for at låse.



Placer mærket korrekt i øret på dyret og klem kæberne på tangen helt sammen.



1. Kanylen skal blive siddende i øverste kæbe på tangen.
2. Placer røret med konserveringsvæske i nederste kæbe på tangen.
Vær sikker på at røret kommer helt på plads.

OBS: Dæk-folien skal blive på røret.



VIGTIGT!

Vær sikker på at nålen rammer midt i folien.
Hold evt. røret lidt på plads, samtidig med at tangen lukkes.

Tryk derefter tangen sammen, indtil røret låses helt fast på kanylen.

Vigtigt!

Forsøg ikke at samle røret og kanylen med fingrene.



Brug ikke for mange kræfter.
Klem kun sammen indtil Røret netop rammer underkanten på fatningen til kanylen.



Vævsprøven er nu færdig og konserveret.
OBS: Det er ikke altid at vævsprøven er synlig i røret. Dette er helt normalt.

77 mm



Allflex elektronik mærket
til venstre øre, sættes i
med en af de røde
tænger fra Allflex

57 mm



Øverst

Den klassiske og robuste Allflex total-tagger

Nederst

Allflex Ultra-matic tangen med udveksling og
automatisk tilbagetrækning af nålen.



Rugmarken 31 • DK 7620 Lemvig • T: 9781 1555
www.allflex.dk